

Probenentnahme und Versand bei Kleintieren

1. Für die Probennahme verwenden Sie bitte Kotröhrchen oder kleine festverschließbare Behälter (**kein Glas!!**) diese erhalten Sie bei uns als Komplettsset (Set mit 3 Röhrchen oder 3 verschließbare Plastikdosen sowie entsprechenden Versandmaterialien zum Unkostenbeitrag zzgl. Porto in Höhe von 5,50 € bitte per E-Mail bestellen), alternativ in der Apotheke oder beim Tierarzt.



2. Bitte beschriften Sie die Röhrchen / die Dosen und die Verpackungsbeutel mit einem wasserfesten Stift mit dem Namen Ihres Tieres und dem Datum der Probennahme.
3. Dieses Tüten-Päckchen können Sie dann in einem Karton oder – im Sommer sehr gut geeignet – einer Styroporbox versenden.
4. Gegen Übernahme der Portokosten senden wir Ihnen die Boxen / Testkits gerne zurück. Bitte machen Sie einen Vermerk dazu auf dem Untersuchungsauftrag.
5. Füllen Sie den Untersuchungsauftrag aus und legen Sie ihn mit in das Paket.
6. Bis zum Versand sollten die Proben **kühl (Kühlschranktemperatur)** gelagert werden.
7. Bitte erkundigen Sie sich bei der Postfiliale nach den Abholzeiten der Pakete durch den Lastwagen und bringen das Paket kurz vorher erst in die Postfiliale, um unnötige Lagerzeiten zu vermeiden.
8. Bei Temperaturen über +20 °C empfehlen wir, den Kotproben Kühlakkus beizulegen und / oder eine Styroporbox zu verwenden.
9. Bitte schützen Sie die Proben gegen Durchweichen und / oder Erfrierungen z. B. durch eine Schicht Zeitungspapier. Diese Schicht saugt auftretendes Schwitzwasser auf und verhindert ein Durchweichen des Kartons.
10. Den Untersuchungsauftrag bitte durch eine gesonderte Plastiktüte vor dem Schwitzwasser schützen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Team des KoProLab Keck

Die Versandadresse für die **Probeneinsendung** ist:

KoProLab Keck
Herzog-Ludwig-Str. 4
84307 Eggenfelden